



NEGRI sas , Via Nazionale 19 35048 STANGHELLA (PD)

PO 249
21/12/12

LEMON BASIC

Dispositivo Medico disinfettante

Proprietà: liquido biocida a base di glutaraldeide per la disinfezione e la sterilizzazione a freddo di dispositivi medici riutilizzabili. Compatibile con i materiali lavabili, facilmente sciacquabile, completo di specifico attivatore in grado di massimizzare l'azione della glutaraldeide. Idoneo per trattamenti manuali o con macchine lavaendoscopi.

Campi di impiego: Per la disinfezione di dispositivi medici quali ferri e strumentario chirurgico lavabile, inclusi quelli di impiego odontoiatrico, endoscopi, citoscopi, broncoscopi, laparoscopi, tubi respiratori, apparecchi di anestesia, che possono essere riutilizzati dopo il trattamento disinfettante

Caratteristiche chimico-fisiche

Aspetto	liquido limpido trasparente
pH (sol. non attivata)	$4 \pm 0,3$
pH sol. attivata	$7,5 \pm 0,3$
densità a 20° C	$1,007 \pm 1\%$
solubilità	completa in acqua

Composizione

100 grammi di prodotto contengono: 2 grammi di Glutaraldeide, coformulanti ed acqua q.b. a 100 g. (liquido attivante: stabilizzatore di pH)

Modalità di impiego

Aggiungere tutto l'attivatore nel contenitore del lemon Basic per renderlo pronto all'impiego, il viraggio del colore garantisce l'avvenuta attivazione. Le soluzioni così preparate mantengono la loro efficacia battericida per 28 giorni

Azione sporicida e sterilizzante a freddo:

Viene ottenuta con un tempo di contatto non inferiore alle 3 ore. Utilizzo della soluzione entro i primi 15 giorni dall'attivazione.

Azione disinfettante

Tempi di contatto di 10 minuti. La soluzione è attiva fino a 28 giorni dall'attivazione.

L'intimo contatto con le superfici da sterilizzare o disinfettare può essere realizzato sia con metodi manuali (immersione) o con sistemi automatici (lavastrumenti). Effettuare un preventivo lavaggio con asciugatura dei dispositivi da sottoporre a trattamento. Prelievo asettico e risciacquo con acqua sterile del dispositivo medico disinfettato o sterilizzato. Non esporre all'aria le soluzioni. Leggere il manuale d'uso del dispositivo medico soggetto al trattamento nella parte pertinente alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione.

Modalità di conservazione

Conservare i contenitori chiusi al riparo dalla luce e da fonti di calore.

Validità: due anni in confezione correttamente conservata

Avvertenze: Nocivo per inalazione e ingestione. Il preparato è irritante per la pelle e le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico. Non utilizzare direttamente sul paziente. Non utilizzare con dispositivi monouso. Non disperdere nell'ambiente.

Prodotto ad uso professionale: utilizzato da personale specializzato con appropriati dispositivi di protezione.

Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico e dispositivi medici. D.M. rientrante nella classe IIB ai fini della Direttiva 93/42/CEE e succ. mod. e integr.



Confezioni

Taniche da 5000ml (in cartone da 4 pezzi)

Flaconi da 1000ml (in cartoni da 12 pezzi)

Fabbricante: NEGRI sas Via Nazionale, 19 35048 Stanghella (Pd) Tel. 0425-91221