

LEMON DRILL

PO359
22/03/10

Dispositivo Medico disinfettante di classe IIb

Proprietà

Disinfettante concentrato per il lavaggio e la disinfezione dei dispositivi medici riutilizzabili. Agisce grazie alla presenza di nuovi composti fenolici e detergenti formulati in modo da esplicare la loro massima attività biocidi, la necessaria compatibilità verso i materiali ed un'ottima azione detergente..

Campi di impiego

Trattamento decontaminante e disinfettante di dispositivi medici, quali ad esempio strumenti e ferri chirurgici, strumentazioni rigide compatibili comprese ottiche, accessori di strumenti a fibre ottiche, vetrerie od oggetti a contatto con sostanze organiche, dispositivi medici in materiali lavabili e disinfettabili non monouso, contenitori sanitari quali padelle ed altri, vetreria da laboratorio.

Diluizioni e modalità di impiego

Viene diluito in acqua in ragione del 2,5% (25 ml in un litro d'acqua). le soluzioni una volta preparate vanno utilizzate in modo da realizzare un contatto per 10 minuti con tutte le superfici del dispositivo medico sottoposto a trattamento. La decontaminazione viene favorita da una azione fisica meccanica compatibile con il dispositivo medico. Leggere il manuale d'uso del dispositivo medico soggetto al trattamento nella parte pertinente alla pulizia e disinfezione. Una volta effettuato il trattamento prelevare i dispositivi con guanti adatti e, qualora non fosse già avvenuto automaticamente, sottoporli ad accurato risciacquo con acqua preferibilmente sterile. Non impiegare con dispositivi monouso, non esporre all'aria le soluzioni e rinnovarle dopo l'uso.

Caratteristiche fisico_chimiche

Aspetto	liquido ambrato
pH sol. 2,5%	9,5 ± 0,5
densità a 20°C	1,050
solubilità	solubile in acqua in ogni rapporto.

Composizione

100g di prodotto contengono : 6,9g di 2-fenilfenolo; 3,0g di 2-benzil-4-clorofenolo; tensioattivi anionici e coformulanti q.b. a 100g.

Avvertenze

R38: Irritante per la pelle.

R41: Rischio di gravi lesioni oculari.

R43: Può provocare sensibilizzazione per contatto con la pelle.

R51/53: Tossico per gli organismi acquatici, può provocare a lungo termine effetti negativi per l'ambiente acquatico.

Conservare fuori dalla portata dei bambini (S2).

In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico (S26).

In caso di contatto con la pelle, lavarsi immediatamente e abbondantemente con acqua (S28)

Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi gli occhi (S36/37/39).

Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. D.M. rientrante nella classe IIb ai fini della Dir CE 93/42 e succ. mod. int. (Dir. CE 47/2007), Decreto Legislativo 24 Febbraio 1997 n.46 e succ. (Dec. lgs 37/2010).



Fabbricante: **NEGRI sas Via Nazionale,19 35048 Stanghella (Padova)-Italy**

Confezioni da lt 1 x12 pezzi