



NG4

SOLUZIONE DETERGENTE

Indicazioni

Pulizia quotidiana delle lenti a contatto rigide e gas permeabili. L'uso costante previene la formazione di depositi e impurità di ogni genere.

Istruzioni per l'uso

1. Metodo

- lavarsi ed asciugarsi accuratamente le mani
- rimuovere le lenti e depositarle sul palmo della mano, versare alcune gocce di detergente NG4 detergere delicatamente con la punta delle dita e le superfici delle lenti
- sciacquare accuratamente le lenti con la soluzione salina NG2 o soluzione disinfettante e conservante prima di riporle nell'apposito contenitore contenente la soluzione disinfettante o conservante

Avvertenze

- prodotto sterile fino all'apertura del flacone
- richiudere bene il flacone dopo l'uso
- tenere lontano dalla portata dei bambini
- non ingerire
- non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti

Composizione

Detergenti anionici e anfoteri 6,0 g, sodio edetato 0,1 g, soluzione isotonica tamponata a pH 7,2 q.b.a 100 ml.

Confezioni : 30 ml

Prodotto da:

Negri sas
Via nazionale, 19
35048 Stanghella (Pd)