



# NG5

## SOLUZIONE DISINFETTANTE RGP

### Indicazioni

Soluzione disinfettante e conservante con spiccate proprietà lubrificanti e umettanti. Indicata per lenti a contatto rigide e gas permeabili e ne rende confortevole l'uso.

### Istruzioni per l'uso

- lavarsi ed asciugarsi accuratamente le mani
- porre le lenti nell'apposito astuccio
- riempire il contenitore con soluzione disinfettante NG5
- lasciare alcune ore o meglio una notte
- prima di procedere all'applicazione inumidire le lenti con una goccia di soluzione NG5

### Avvertenze

- prodotto sterile fino all'apertura del flacone
- richiudere bene il flacone dopo l'uso
- utilizzare il prodotto entro 90 giorni dalla prima apertura
- tenere lontano dalla portata dei bambini
- non ingerire
- non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti
- consultare il professionista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti a contatto.

### Reazioni avverse

In caso di irritazione persistente o progressiva, sospendere l'uso delle lenti a contatto e consultare il proprio medico oculista. Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

### Composizione

Poliesametilbiguande (PHMB) 0,0001 g, polyquaternium 2 0,006 g, poloxamer 407 1,000 g, ipromellosa 0,100 g, soluzione isotonica tamponata a pH 7,2 q.b. A 100 ml

**Confezioni : 200 ml**

**Prodotto da:**

Negri sas

Via nazionale, 19

35048 Stanghella (Pd)