

## LEMON ACID

### **Dispositivo Medico disinfettante di classe IIB**

**Proprietà:** LEMON ACID è un disinfettante pronto all'uso a base di glutaraldeide acida per la disinfezione di dispositivi medici riutilizzabili. Presenta uno spettro d'azione completo verso: batteri, miceti, virus, spore e micobatteri, la sua reazione acida consente la stabilità del principio attivo nella forma libera. Compatibile con i materiali lavabili e facilmente sciacquabile, non corrode i metalli e non deteriora la gomma. Idoneo per impiego manuale o con ultrasuoni .

**Campi di impiego:** Per la disinfezione a freddo di dispositivi medici quali ferri chirurgici (inclusi quelli di impiego odontoiatrico), strumenti a fibre ottiche, tubi respiratori, apparecchi di anestesia, dispositivi medici riutilizzabili termosensibili.

#### **Caratteristiche chimico-fisiche**

Aspetto	liquido
pH	acido
densità a 20° C	1,070
solubilità	completa in acqua

**Composizione:** 100 grammi di prodotto contengono: 2 grammi di Glutaraldeide, eccipienti ed acqua depurata q.b. a 100 g.

#### **Modalità d'Impiego**

**LEMON ACID** è pronto all'uso.

Si raccomanda di immergere completamente gli strumenti da disinfettare nella soluzione dopo averli accuratamente lavati ed asciugati. Conservare la soluzione in vasca coperta

Tempi di contatto:

**disinfezione in immersione** minimo 10 minuti.

Processi di **sterilizzazione chimica a freddo per immersione** tempi di contatto oltre le 3 ore fino a 10 ore

Una volta completato il trattamento, rimuovere i dispositivi asetticamente, risciacquarli abbondantemente ed ed asciugarli.

In ogni caso leggere il manuale d'uso del dispositivo medico soggetto al trattamento nella parte pertinente alla pulizia, disinfezione e sterilizzazione. Non immergere oggetti in acciaio al carbonio per oltre 24 ore

#### **Modalità di conservazione**

Conservare i contenitori chiusi , al riparo dalla luce e da fonti di calore. Una volta aperta, la confezione di LEMON ACID puo' rimanere attiva per 12 settimane purché conservata chiusa ed al riparo da fonti di calore.

Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. D.M. rientrante nella classe IIB ai fini della direttiva 93/42/CEE e succ. mod.e integ.

**Avvertenze:** Nocivo per inalazione e ingestione. Il preparato è irritante per la pelle e le vie respiratorie. Rischio di gravi lesioni oculari. Può provocare sensibilizzazione per inalazione e contatto con la pelle. In caso di contatto con gli occhi lavare immediatamente e abbondantemente con acqua e consultare il medico. Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia. In caso di incidente o di malessere consultare immediatamente il medico. Non utilizzare direttamente sul paziente. Non utilizzare con dispositivi monouso. Non disperdere nell'ambiente.

Prodotto ad uso professionale: utilizzato da personale specializzato con appropriati dispositivi di protezione.

#### **Confezioni**

Flacone da 1Litro

#### **Fabbricante**

NEGRI sas Via Nazionale, 19 35048 Stanghella (Pd) tel. 0425-91221





---

NEGRI sas , Via Nazionale 19 35048 STANGHELLA (PD)

## ***Scheda Tecnica***

---