

## **Lemon DETERFERRI**

### **Proprietà**

LEMON DETERFERRI è un decontaminante ad azione disinfettante ad elevate prestazioni, con spiccate proprietà detergenti per il primo intervento di decontaminazione e pulizia dello strumentario chirurgico lavabile non monouso.

E' costituito da una base quaternaria di ultima generazione con spiccate proprietà disinfettanti e da un compound di tensioattivi non ionici.

Il preparato è a schiuma controllata e consente di effettuare efficacemente la decontaminazione primaria dello strumentario chirurgico che, una volta pulito in sicurezza, potrà seguire le successive fasi fino alla sterilizzazione. Non contiene aldeidi, non contiene fenoli.

Attivo contro batteri, funghi e virus ( HIV- HBV -HCV)

### **Applicazioni**

Disinfettante detergente per il lavaggio e la decontaminazione di dispositivi medici e strumentario in chirurgia, inclusa l'odontoiatria ed inclusi endoscopi, vetreria da laboratorio. Per la sua elevata compatibilità risulta adatto per immersione di strumentario vario, dall'inox medico a strumenti in plastica e gomma.

### **Caratteristiche chimico Fisiche**

Aspetto	liquido
pH sol 1%	8,5± 0,5
densità a 20° C	1,090
solubilità	completa in acqua

### **Dosaggi e Modalità d'impiego**

Lemon Deterferri è concentrato da usare diluito dallo 1% al 2% in acqua.

Versare il prodotto nell'acqua alla concentrazione d'uso prestabilita ed immergere gli strumenti nella soluzione ed attendere il tempo necessario allo svolgimento dell'azione disinfettante decontaminante, quindi risciacquare abbondantemente prima di inviarli alla disinfezione e/o sterilizzazione.

L'azione meccanica compresi ultrasuoni migliorano le prestazioni del dispositivo disinfettante.

Tempi di contatto minimi per l'azione disinfettante 10 minuti.

Non utilizzare su dispositivi monouso, una volta contaminate le soluzioni vanno rinnovate.

### **Composizione**

100 g di prodotto contengono : didecyl dimethyl ammonio cloruro g 10, Tensioattivi non ionici, coadiuvanti della detergenza ed Acqua depurata qb a g 100,00.

### **Condizioni di Conservazione**

Conservare il prodotto ben chiuso al fresco e all'asciutto. Una volta aperta la confezione richiudere ad ogni prelievo ed utilizzarla entro la scadenza indicata

### **Avvertenze**

R34 - provoca ustioni - S24/25 - evitare il contatto con gli occhi e la pelle- S26 - in caso di contatto con gli occhi, lavare immediatamente ed abbondantemente con acqua e consultare un medico. S27/28 - in caso di contatto con la pelle, togliersi di dosso immediatamente gli indumenti contaminati e lavarsi immediatamente ed abbondantemente con acqua.

S36/37/39 - Usare indumenti protettivi e guanti adatti e proteggersi la faccia

### **Confezioni**

Flacone da 1Litro

### **Fabbricante**

NEGRI sas Via Nazionale,19 35048 Stanghella (Pd)

