

LEMON ENZIMATICO

Detergente TRI Enzimatico per il lavaggio di dispositivi medici

Proprietà

“Sistema detergente” trienzimatico a base di tensioattivi nobili e di enzimi.

Gli enzimi presenti in LEMON ENZIMATICO appartengono alla famiglia delle: proteasi, amilasi e lipasi. La formulazione di LEMON ENZIMATICO è a schiuma controllata. Il suo impiego viene consigliato per la preliminare rimozione di sangue e contaminanti organici dai dispositivi medici da sottoporre a successiva disinfezione o sterilizzazione. La presenza degli enzimi interviene nel processo di detersione accelerando l'azione dei tensioattivi con il risultato di agire velocemente ed efficacemente nel distacco dello sporco dalle superfici dei dispositivi contaminate. Rappresenta un prodotto insostituibile nella prassi decontaminante dei dispositivi chirurgici. È indicato per lavaggi manuali ad immersione, per lavastumenti e negli apparecchi ad ultrasuoni.

Campi di applicazione

Lavaggio e pulizia di strumentario in chirurgia, gastroenterologia, urologia, ortopedia, ginecologia, odontoiatria, ematologia. Per la pulizia di endoscopi, vetreria da laboratorio, strumenti in plastica e gomma.

Caratteristiche chimico fisiche

aspetto:	liquido
densità 20°C:	1,030 ± 1%
pH sol 1%:	7,5 ± 0,5
solubilità:	completamente solubile in acqua

Dosi e Modalità di impiego

0,15% pari a 1,5 ml. in un litro di acqua meglio se a 40°C. Versare il prodotto nell'acqua, immergere gli strumenti nella soluzione quindi risciacquare abbondantemente con acqua prima di inviarli alla disinfezione e/o sterilizzazione.

Tempi di contatto nella soluzione: da 1 a 5 minuti a seconda del grado di sporco.

Composizione: (Reg 648/2004 CE)

Tensioattivi anionici non ionici >30% ; solventi, stabilizzanti, conservanti 15-30%; miscela di enzimi 5-15%.
NON CONTIENE FOSFORO

Modalità di conservazione e validità

Conservare la confezione in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore, evitare le alte temperature. Utilizzare il prodotto entro la data di scadenza riportata in ogni confezione. Una volta aperta la confezione richiuderla dopo ogni prelievo al fine di garantire la durata del contenuto fino alla scadenza. Le soluzioni vanno realizzate al momento dell'uso, una volta contaminate vanno rinnovate. Le soluzioni vanno comunque rinnovate giornalmente

Avvertenze

Il concentrato è nocivo per ingestione- Irritante per la pelle – Rischio di gravi lesioni oculari – Può provocare sensibilizzazione per inalazione - In caso di contatto con gli occhi lavare subito ed abbondantemente con acqua e consultare il medico- usare guanti adatti e proteggersi gli occhi. Conservare il prodotto in luogo fresco, al riparo dalla luce e da fonti di calore, evitare le alte temperature. Non disperdere nell'ambiente. Uso esterno.

Attenzione: LEMON ENZIMATICO non è un disinfettante.

PRODOTTO AD USO PROFESSIONALE

Confezioni

FM0827 flaconi da 1000 ml in cartoni da 12 pz
FM0753 flaconi da 500ml cartoni da 12 pz

Accessorio di Dispositivo medico disinfettante ad impiego professionale per la disinfezione di strumentario chirurgico o dispositivi medici. D.M.
Accessorio rientrante nella classe IIB secondo la direttiva 93/42/CEE e succ. integrazioni (Dir 2007/47/CE)

Fabbricante : NEGRI SAS via Nazionale, 19- 35048 Stanghella PADOVA - tel 042591221 - fax 042591221



Le informazioni qui contenute si basano sulle nostre conoscenze, alla data sopra riportata. Si riferiscono al preparato indicato e non costituiscono una specifica o una garanzia di particolare qualità. L'utilizzatore è tenuto ad assicurarsi della idoneità e completezza di tali informazioni in relazione all'utilizzo specifico che intende fare.

Sistema di Gestione Qualità Certificato
UNI EN ISO 9001:2008
UNI CEI EN ISO 13485:2012