



NG2

SOLUZIONE SALINA

Indicazioni

E' indicata per idratare e risciacquare tutte le lenti a contatto. Si consiglia di utilizzare la soluzione salina NG2 dopo aver eseguito tutte le operazioni di manutenzione delle lenti a contatto, prima di applicare sugli occhi.

Istruzioni per l'uso

- lavarsi ed asciugarsi accuratamente le mani
- togliere le lenti dall'astuccio contenente il conservante
- sciacquare le lenti con la soluzione salina NG2 prima di procedere all'applicazione

Controindicazioni

Non esistono controindicazioni accertate, se non in caso di allergia, o ipersensibilità specifica per qualche componente.

Avvertenze

- prodotto sterile fino all'apertura del flacone
- richiudere bene il flacone dopo l'uso
- utilizzare il prodotto entro 90 giorni dalla prima apertura
- tenere lontano dalla portata dei bambini
- non ingerire
- non utilizzare il prodotto se allergici ad uno qualsiasi dei componenti
- consultare il professionista prima di usare qualsiasi medicinale oftalmico mentre si portano le lenti a contatto.

Reazioni avverse

In caso di irritazione persistente o progressiva, sospendere l'uso delle lenti a contatto e consultare il proprio medico oculista. Seguire attentamente le istruzioni riportate in etichetta.

Composizione

sodio edetato, soluzione isotonica tamponata a pH 7,2 q.b.a 100 ml.

Confezioni : 550 ml

Prodotto da:

Negri sas

Via nazionale, 19

35048 Stanghella (Pd)